



SORRENTO BARIATRI™

Instruktionsmanual

INDHOLD

- 3 Teknisk specifikation**
- 5 Betjeningsvejledning**
 - 5 Justering af rygvinkel
 - 5 Tilt- og hældningsvinkler
 - 6 Løft af ben
 - 6 Fodplade højde
 - 7 Fodplade vinkel
 - 7 Justering af sædebredde
 - 8 Fjernelse af armlæn
 - 8 Justering af armlænets højde
 - 9 Benstøtte med negativ vinkel
 - 9 Justering af sædedybde
 - 10 Yderligere justering af sædedybde
 - 11 Fjernelse af den nederste "vandfalds"-rygpude
 - 11 Sædepude
 - 12 Bevægelse af stolen
 - 14 Opladning af stolen
- 15 Rengøringsvejledning**
- 16 Sikkerhedsinstruktioner**
- 17 Vedligeholdelse og service**
- 18 Genbrugspolitik**
- 19 Garanti**
- 20 Intellectuel ejendomsret**

TEKNISK SPECIFIKATION

GRUNDLÆGGENDE DIMENSIONER

| | |
|-----------------|----------------|
| A Samlet højde | 1300 mm / 51"* |
| B Ryghøjde | 750 mm / 30" |
| C Sædehøjde | 600 mm / 24"* |
| D Samlet længde | 1300 mm / 51" |

*Højdemål er baseret på 77mm hjul.

SÆDE TIL FODPLADE HØJDEJUSTERINGER

| | |
|-------|--------------------------|
| E Høj | 310 mm / 12" fra sædet |
| F Lav | 520 mm / 20,5" fra sædet |

TILGÆNGELIGE SÆDE- OG OVERORDNEDE BREDDER

| G (sædebredde) | H (samlet bredde) |
|----------------|-------------------|
| 600 mm / 24" | 885 mm / 35" |
| 650 mm / 26" | 885 mm / 35" |
| 700 mm / 28" | 935 mm / 37" |
| 750 mm / 30" | 985 mm / 39" |
| 800 mm / 32" | 1035 mm / 41" |
| 850 mm / 34" | 1085 mm / 43" |

MULIGHEDER FOR ARMHØJDE

| | |
|----------|--------------|
| I Medium | 740 mm / 29" |
| J Høj | 765 mm / 30" |

SÆDEDYBDE

K *610-530 mm - / *24"-21"

*For den længste sædedybde, fjern den nederste "vandfalds"-rygpude.

FRIHØJDE

L 140 mm / 6"*

*Højdemål er baseret på 77mm hjul.

TILBAGELÆNS- OG VIPPEVINKLER

ii Rygvinkel tilbagelænet

90° - 130° 40° spændvidde

iii Benstøttevinkel


90° - 125° 35° spændvidde

iv Tilt

Fra 5° fremad, eller anterior, vip til 30° baglæns hældning.

Stolens vægt ubelastet: 10,6 stone / 67 kg / 147,7 lb

Patient vægtgrænse: 46 Stone / 294 Kg / 650 lb

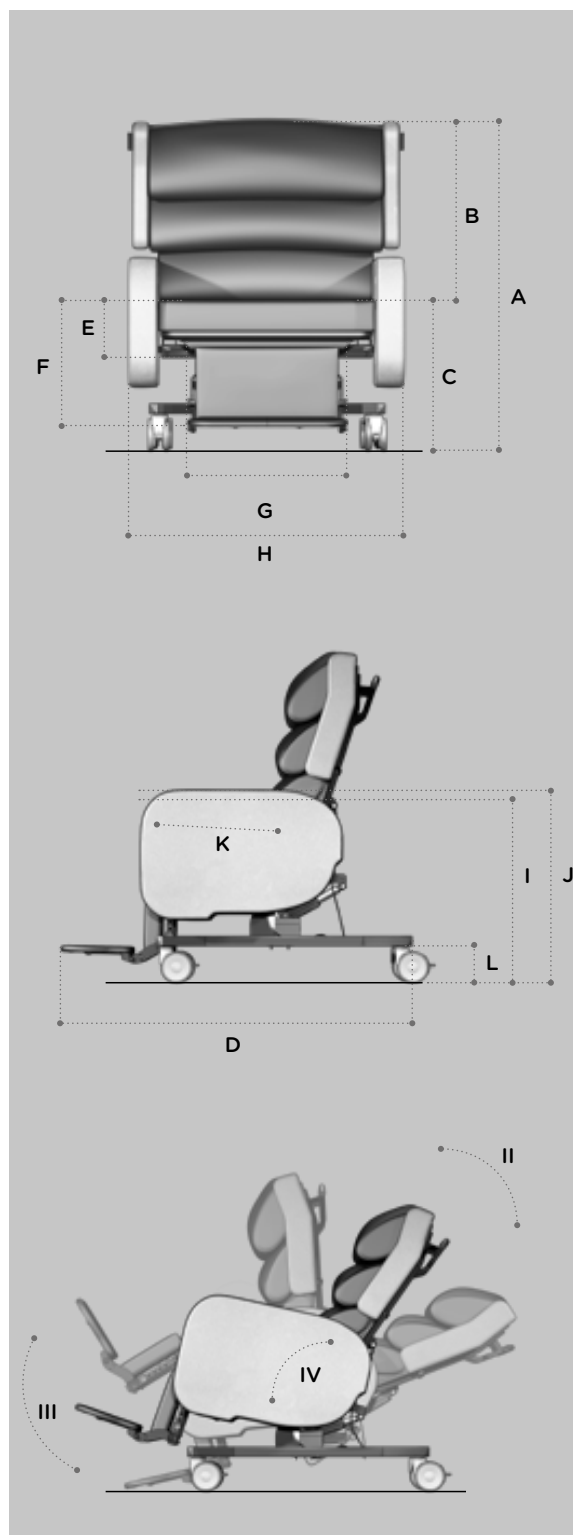

TERMINOLOGIER

PATIENT

Den person, der sidder i stolen.

BRUGER

Kompetent person med ansvar for de personer, der sidder i stolen, samt udstyrets egnethed til patienten. Brugeren er ansvarlig for at kontrollere stolen for fejl under brugen.

Alle instruktioner skal læses og forstås, før stolen må tages i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING

JUSTERING AF RYGVINKEL

Tilbagelæning stoleryggen (fig.1).

Brug knapperne på håndsettet til at flytte stoleryggen langsomt indtil den er i den rette stilling.

- i. Til siddende stilling (fig.1a).
- ii. Til tilbagelænet stilling (fig.1b).



Fig. 1

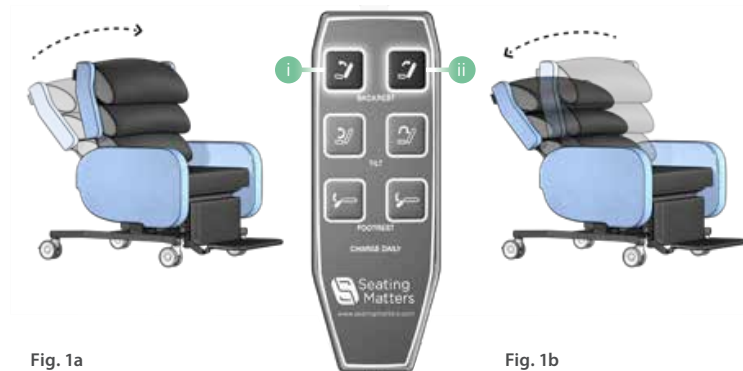


Fig. 1a

Fig. 1b

TILT- OG HÆLDNINGSVINKLER

Sådan justerer du stolens hældningsvinkel (fig.2).

Brug knapperne på håndsettet til at flytte stolens hældningsvinkel langsomt, indtil den er i den ønskede stilling.

- i. Til siddende stilling (fig.2a).
- ii. Til tilbagelænet stilling (fig.2b).



Fig. 2

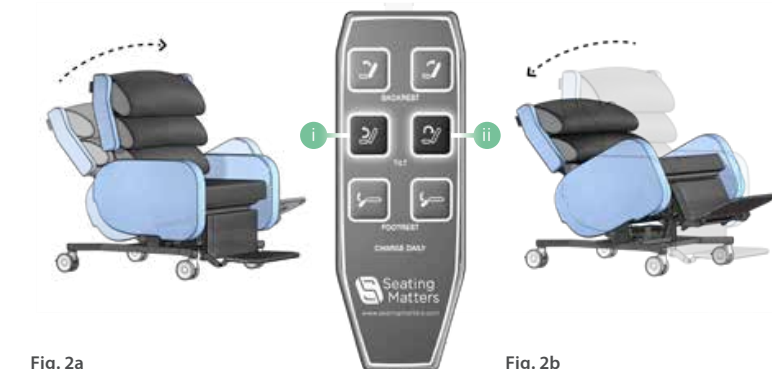


Fig. 2a

Fig. 2b

LØFT AF BEN

Sådan justerer du vinklen på benstøtten (fig.3).

Brug knapperne på håndsettet til at flytte benstøtten på stolen langsomt, indtil den er i den ønskede stilling.

- i. Benstøtte til hævet stilling (fig.3a).
- ii. Benstøtte til siddende stilling (fig.3b).

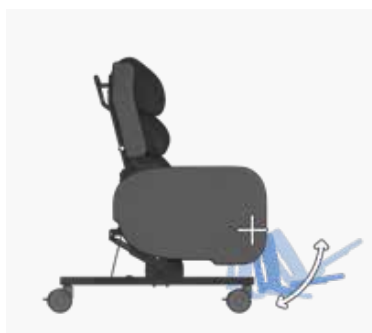


Fig. 3

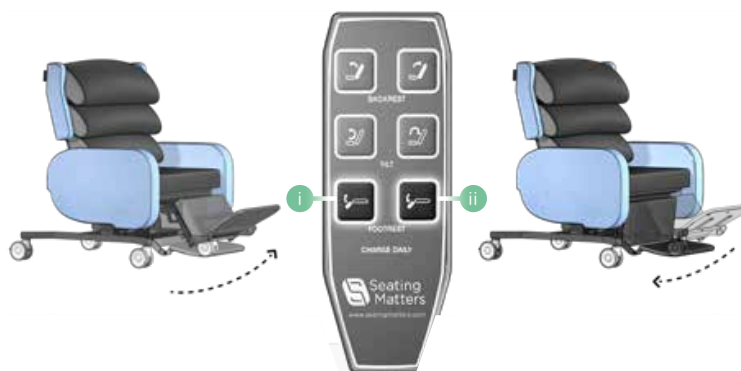


Fig. 3a

Fig. 3b

FODPLADE HØJDE

Sådan justerer du afstanden mellem sæde og fodplade på stolen (fig.4).

Fra forsiden af stolen lokaliserer du, med brug af begge hænder, de to fjederstempler på hver side af lægpuden (fig.4a).

Træk begge fjederstempler udad samtidig og flyt fodpladen til den korrekte position før frigivelse.

Stiften på fjederstemplet vil placere sig i nærmeste hulposition og låse sig fast (fig.4b).

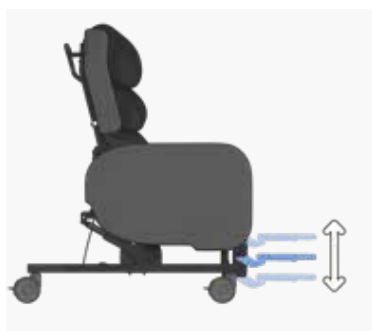


Fig. 4



Fig. 4a

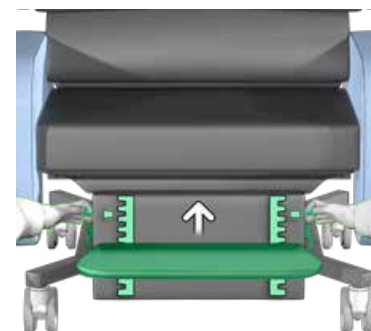


Fig. 4b

FODPLADE VINKEL

Sådan justerer du vinklen på fodpladen (fig.5).

Løsn og fjern fastgørelsesbolten på hver side af fodpladetappen ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle og en 10 mm skruenøgle (fig.5a).

Flyt begge bolte til den ønskede indstilling (fig.5b) og spænd dem godt fast.

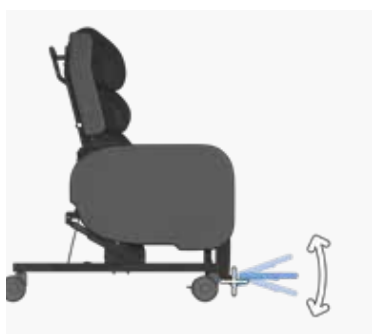


Fig. 5

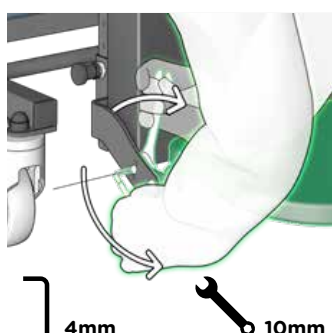


Fig. 5a

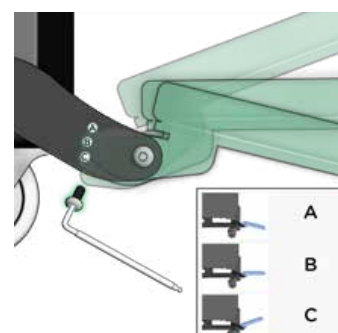


Fig. 5b

JUSTERING AF SÆDEBREDDE

Sådan øger eller reducerer du sædebredden på stolen (fig.6).

Stil dig foran stolen og find de blå fingerskruer på hver side ved at række ind under armlænene og lokalisere dem (fig.6a). Løsn fingerskruerne lidt.

Fra bagsiden af stolen lokaliserer du de blå vingemøtrikker på venstre og højre side af sæderammen og løsner dem lidt. (fig. 6b)

Flyt armlænene til den ønskede position og stram vingemøtrikkerne, så de er sikkert fastgjort.



Fig. 6

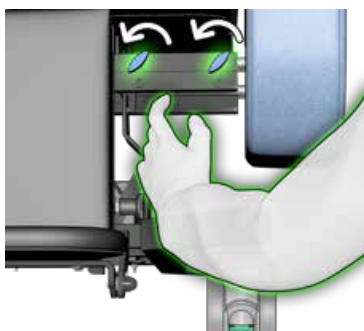


Fig. 6a

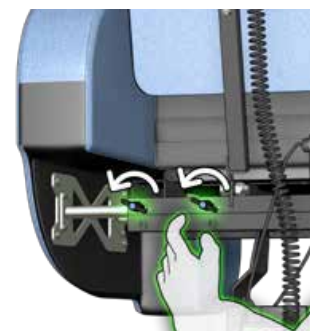


Fig. 6b

FJERNELSE AF ARMLÆN

Sådan fjerner du stolens armlæn (fig.7).

Stående foran stolen rækker du ned og finder de **blå** fingerskruer under den stolearm, som du vil fjerne (fig.7a). Løsn skruerne en anelse.

Stående bag stolen finder du derefter de **blå** vingemøtrikker på siden af det armlæn, som du vil fjerne (fig.7a). Løsn disse vingemøtrikker lidt. Nu er armlænet frigjort, og du kan fjerne det og sætte det et sikkert sted. (fig.7b)

Spænd justeringsknapperne fast igen.



Fig. 7

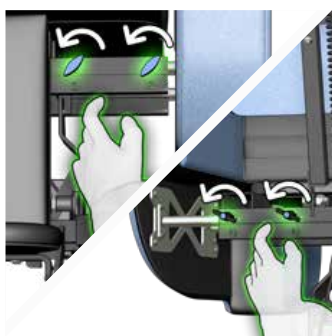


Fig. 7a

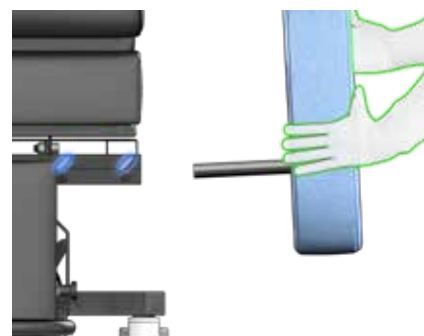


Fig. 7b

JUSTERING AF ARMLÆNETS HØJDE

Sådan justerer du højden på stolens armlæn (fig.8)

Stående foran stolen rækker du ned og finder de **blå** fingerskruer under den stolearm, som du vil justere (fig.8a). Fjern disse fingerskruer og læg dem til side.

Stående bag stolen finder du derefter de **blå** vingemøtrikker på siden af det armlæn, som du vil justere (fig.8a). Fjern disse vingemøtrikker og læg dem til side.

Armlænet er nu frit, og du kan tage det ud og flytte det til den ønskede højde (fig.8b).

Spænd vingemøtrikkerne for at fastgøre armlænet igen.



Fig. 8

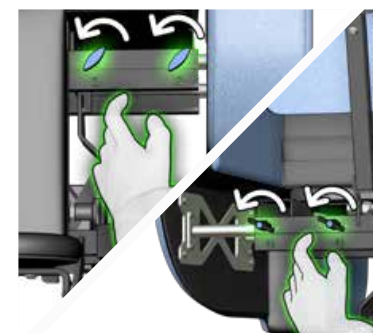


Fig. 8a

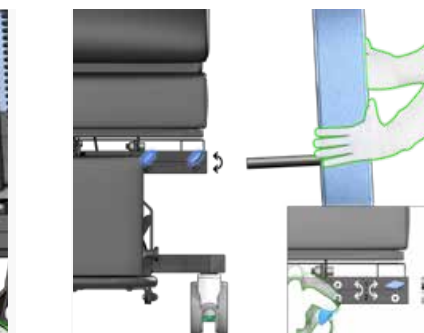


Fig. 8b

BENSTØTTE MED NEGATIV VINKEL

Den lukkede vinkel på benstøtten kan justeres indad for at opnå en negativ vinkel (fig.9). Det er nødvendigt at bruge værktøj til at udføre denne justering (fig.9a).

Fjern armlænene for at lette adgangen (se side 11).

Med to 13 mm skruenøgler løsnes og fjernes fastgørelsesboltene på hver side af benstøtten (fig.9a). Flyt fastgørelsesboltene til den ønskede indstilling (fig.9b) og spænd dem sikkert fast.



Fig. 9

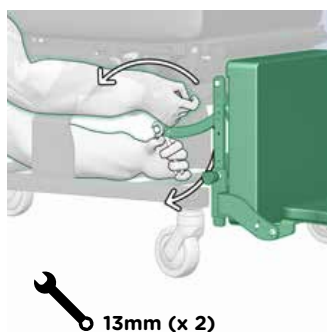


Fig. 9a

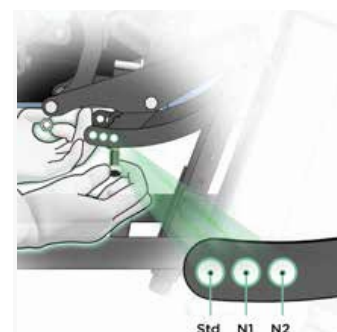


Fig. 9b

| Std (Standardindstilling) | N1 | N2 |
|---------------------------|-----|-----|
| 90° | 75° | 60° |

JUSTERING AF SÆDEDYBDE

Sådan justerer du stolens sædedybde (fig. 10).

Stående foran stolen rækker du ned under sædebunden og finder de **gule** fingerskruer på højre og venstre side af lægpuden. Løsn disse fingerskruer ved at dreje dem mod uret (fig.10a).

Med begge hænder placeret på lægpuden ændrer du sædedybden ved at trække lægpuden fremad eller skubbe den tilbage, indtil den er i den ønskede position (fig.10b). For at låse sædedybden i den nye position, skal du stramme de **gule** fingerskruer ved at dreje dem med uret.



Fig. 10



Fig. 10a



Fig. 10b

YDERLIGERE JUSTERING AF SÆDEDYBDE

Rygrammens position kan flyttes med henblik på yderligere justering af sædedybden (fig.11). Det er nødvendigt at bruge værktøj til at udføre denne justering (fig.11a).*

Fjern stolens armlæn for at lette adgangen (se side 11).

Fra bagsiden af stolen løsner du det bagerste fikseringspunkt ved at dreje bolten mod uret. Til dette skal du bruge en 10mm unbrakonøgle til umbrakobolten og en 17 mm skruenøgle til M10 møtrikken (fig.11a). Fjerne begge monteringsbolte og sæt dem i igen i den ønskede position (fig.11b). Stram begge bolte, så bagsiden er sikker uden nogen sidelæns bevægelse.

***Disse justeringer bør kun foretages af Botved eller en anden udbyder, der er godkendt af Seating Matters.**



Fig. 11

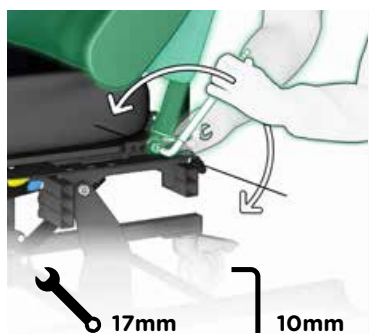


Fig. 11a



Fig. 11b

Der er 4 muligheder for sædedybder.

| A | B | C | D |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 610-580mm | 590-560mm | 570-540mm | 550-530mm |
| 24-22,5" | 23-22" | 22,5-21" | 22-20,5" |

For størst mulig sædedybde skal du fjerne den nederste "vandfalds"-rygpude. Se side 16 for instruktioner.

FJERNELSE AF DEN NEDERSTE "VANDFALDS"-RYGPUDE

Sådan fjerner du den nederste vandfalds-rygpude på Sorrento Bariatri (fig.12)

Stående foran stolen knapper du den nederste vandfalds-rygpude op (fig.12a) og fjerner den for at øge sædets dybde. Det har især betydning for patienter med en udtalt gluteal hylde (fig.12b).



Fig. 12

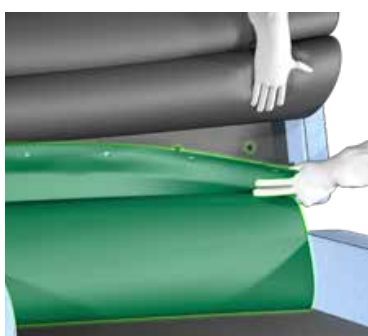


Fig. 12a



Fig. 12b

SÆDEPUDE

Sådan fjerner og tilpasser du den modulære Seating Matters siddehynde (fig.13).

Undersiden på Seating Matters siddehynden og stolens siddeplade er betrukket med et skridsikkert materiale, som skaber en friktionskontakt, når stolen benyttes. For at tilpasse puden korrekt skal du placere den på siddepladen med den skridsikre underside vendende nedad (fig. 13a). Den bagerste ende af siddehynden med lynlås skal vende mod ryggen af stolen (fig.13b). Se pudemærkat for information.

For at fjerne puden skal du blot løfte den ud af stolen.



Fig. 13



Fig. 13a



Fig. 13b

Korrekt montering af Seating Matters siddehynden er vigtig, da strukturen af skummet KUN giver en god nedsenkning, når den er monteret som beskrevet ovenfor.

BEVÆGELSE AF STOLEN


Hjul med retningslås

Sådan kontrollerer du retning og manøvredegtighed, mens du skubber stolen (fig. 14c).


Hjulet med retningslås er placeret på forreste venstre side af stolen (fig.14). For at aktivere dette hjul skal du blot trykke på den grønne pedal med din fod (fig.14a) og dreje hjulet, indtil det klikker ind i den fremadrettede position (fig.14b).




Fig. 14

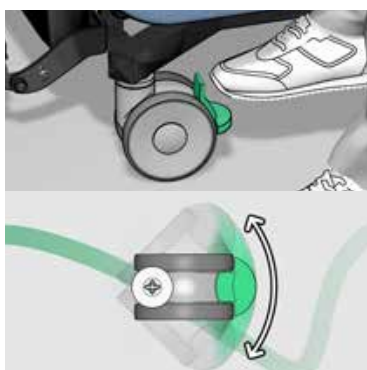

(fig.14a) Retningslås frakoblet.

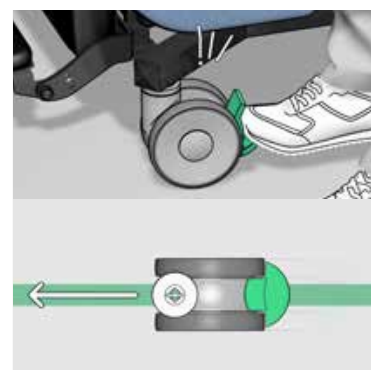

(fig.14b) Retningslås aktiveret.

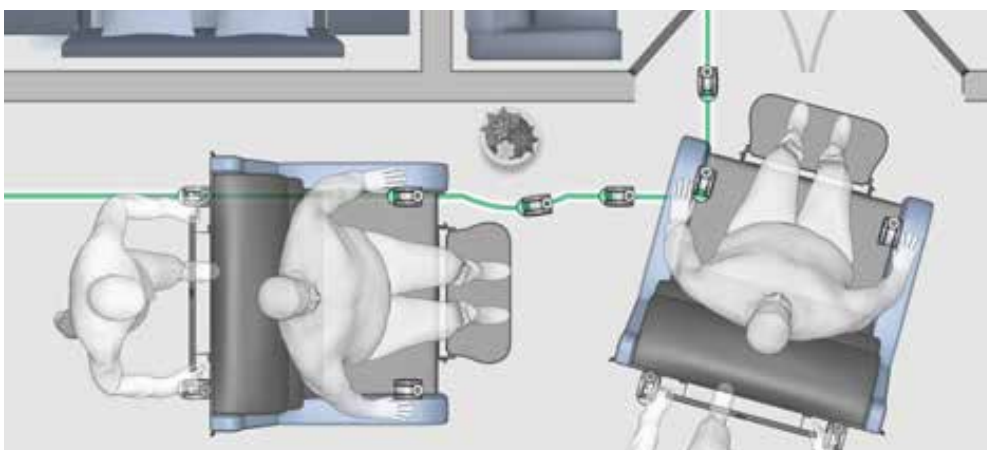

(fig.14c) Her vises hvordan retningslåsen anvendes til at forbedre manøvredegtigheden.


Bremsehjul

Sådan fastlåser du stolens position (fig.15c).


Begge baghjul på stolen er med totallås (fig.15). Når den er tilkoblet, vil drejning og rotation af hjulet blive låst. For at aktivere bremsehjulet skal du blot trykke på pedalen med din fod, indtil den klikker på plads (fig.15b).




Fig. 15

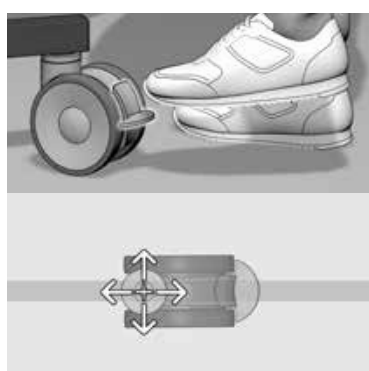

(fig.15a) Alle låse udkoblet.

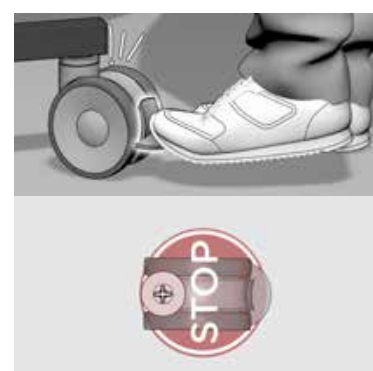

(fig.15b) Bremsehjul aktiveret.

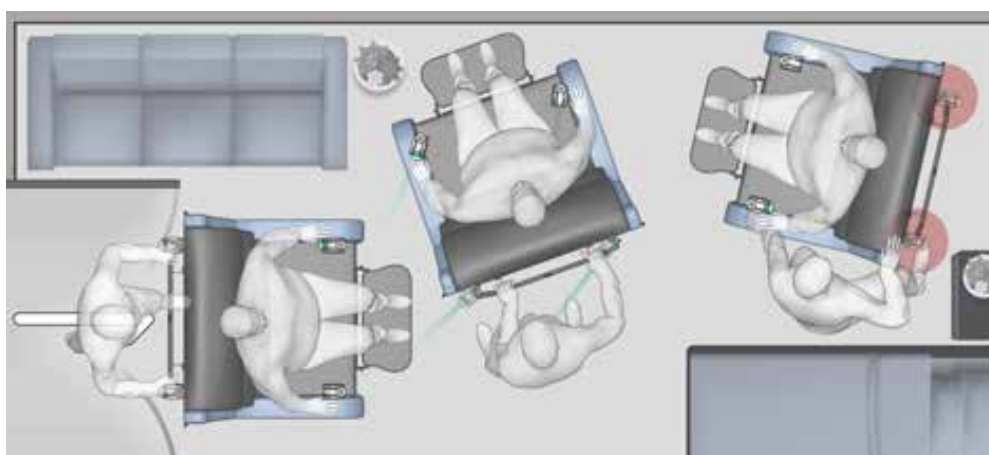

(fig.15c) Her ser du stolen i låst position.

OPLADNING AF STOLEN

Kun for motoriserede modeller.

Stolen leveres fuldt opladet. Det anbefales at oplade stolen dagligt for at bevare batteriets ydeevne.

Samling af oplader

Opladeren består af to dele: opladerens krop og opladeradapteren. Du skal blot skubbe opladeradapteren ind i opladerhuset og sikre, at den er klikket på plads (**fig.16a**).

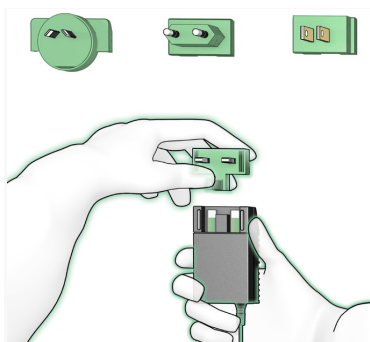


Fig. 16a



Fig. 16b

For at oplade stolen skal du sætte opladeren i en stikkontakt og sætte stikket i opladningsstikket på venstre side af håndsettet (**fig.16b**).

Overvåg stolens opladningsstatus ved hjælp af statuslyset (**fig.16d**).

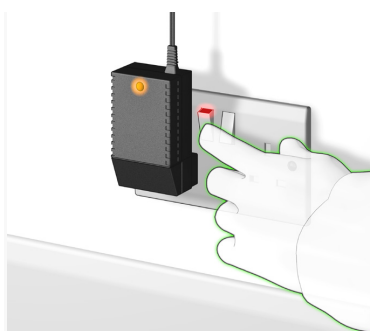


Fig. 16c


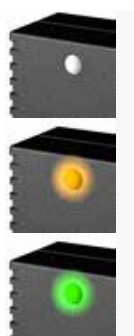


Fig. 16d

- Intet lys**
Ingen strøm/forbindelse.
- Orange lys**
Tilsluttet, oplader.
- Grønt lys**
Tilsluttet, fuldt opladet.

RENGØRINGSVEJLEDNING

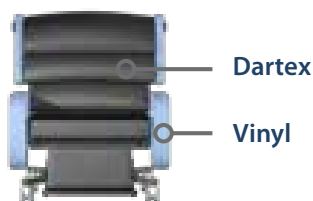

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF POLSTRING

Seating Matters stolen er betrukket med to forskellige materialer: Vinyl og Dartex multi-stretch materiale. Billedet til venstre viser, hvor disse materialer er på stolen.

VINYL

EGENSKABER

Vinyl er modstandsdygtig over for urin, de fleste almindelige pletter fra husholdningen, milde syrer/alkalier og drikkevarer, da de ikke absorberes og kan tørres af uden problemer eller varig skade. Nogle kraftige farvestoffer såsom læbestift, kuglepensblæk og madfarver skal renses af straks for at undgå misfarvning.

DARTEX MULTI STRETCH STOF

EGENSKABER

Dartex er vandtæt, kan vaskes og har en biostatisk og anti-mykotisk belægning. Dette skaber en uigennemtrængelig barriere for virus og bakterier.

RENGØRING

Overfladisk snavs kan fjernes ved aftørring med en blød klud fugtet med vand indeholdende et neutralt rengøringsmiddel. Kraftigere snavs kan behandles ved at vaske af med sprit eller mineralsk terpentint efterfulgt af varmt vand og rengøringsmiddel.

Rutinemæssig rengøring og desinfektion kan evt. udføres på beklædningen med håndvarmt vand og et neutralt rengøringsmiddel eller med en klorholdig opløsning (0,1 % eller 1000 ppm klor). Materialet er kompatibelt med 10.000 ppm klor til dekontaminering af blod. Overskydende opløsning skal fjernes og overfladen skylles og tørres grundigt før genbrug eller opbevaring.

Desinfektionsmidler kan anvendes forudsat at producentens instruktioner følges.

Alle rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal skylles grundigt af og emnet tørres efter rengøring.

DET KAN DU BRUGE:

- 1. Varmt sæbevand** Brug varmt sæbevand til at vaske din stol. Husk det er vigtigt at tørre overfladen af bagefter.
- 2. 70% Alkohol** Dette kan bruges efter producentens retningslinjer.
- 3. Blegemiddel** Blegemiddelkoncentrationer fra 1.000 ppm til 10.000 ppm klorin kan sandsynligvis betragtes som effektiv rengøring.

Brug blegemiddel sparsomt.

Eksempel på fortyndingsforhold

Ppm for klorin kan variere med hvert enkelt mærke.

Søg online efter klorinmærkets datablad og juster dit forhold i overensstemmelse hermed for at opnå en fortynding på ca. 1000 ppm.



Vand



Blegemiddel

For en dybtgående guide til rengøring tjek venligst Seating Matters "Clinicians Guide to Infection Control", som er tilgængelig deres hjemmeside.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

MONTERING, INSTALLATION, ADVARSLER OG FARER

1. En kompetent person eller bruger, der er uddannet i brugen af stolen, og som enten er en passende kvalificeret læge eller arbejder under deres vejledning og instruktion, bør foretage justeringer og opsætning af produktet i henhold til borgers sundhedsfaglige krav og dimensioner, før borger sætter sig i stolen. Hvor det er muligt, bør der foretages justeringer, når borger ikke sidder i stolen, for at undgå skader på brugeren og borgeren.
2. Dette produkt og dets tilbehør skal anvendes i overensstemmelse med lokale og regionale retningslinjer vedrørende brug af sådant medicinsk udstyr.
3. Denne stol skal være komplet samlet, og stolen skal sikkerhedskontrolleres af en kompetent person inden brug.
4. Brugeren skal sikre, at produktet er i god stand før brug (tjek at alle møtrikker og bolte er spændt, stof i god stand osv.). Hvis der er problemer, skal disse indberettes til Botved – tlf. **80 37 37 37** eller **info@botved.dk** - og rettes, før stolen tages i brug.
5. Hold alle kropsdele væk fra mekanismer under stolen. Reparationer og vedligeholdelse bør kun udføres af Botveds teknikere.
6. Vær forsigtig med at bruge udløserhåndtaget til tilbagelæningsmekanismerne og -justeringerne for at undgå skader.
7. Tryksårs- eller trykskadereduktioner er ikke garanteret med dette udstyr. Brugeren skal sikre, at borgeren er ude af stolen i en periode efter længere tids brug af denne for at hæve iltningsniveauet i vævet. Selvom stolen byder på trykstyring, har kropsvævet stadig brug for tid til at komme sig. Mange steder anbefaler lokale eller nationale retningslinjer maksimalt 2 timers sidde tid ad gangen. Borgerens specifikke anbefalinger skal også observeres, og retningslinjer, som er fastsat af dennes sundhedspersonale, med hensyn til brugen af tilt og tilbagelæning til passende trykstyring, bør følges.
8. Stolen skal bruges på en plan, jævn og hård overflade med bremsene aktiveret for at undgå, at den bevæger sig under brug og for at sikre stabilitet. Når stolen ikke er i transit, skal alle bremsehjulene på produktet aktiveres for at forhindre risiko for skade under brug.
9. Produktet må ikke efterlades udendørs. Mere information om rengøringsmidler og deres egnethed kan findes senere i manualen.
10. Justeringer af terapistolen må kun foretages af kompetent og uddannet personale.
11. Ved tvivl om justeringerne, så kontakt Seating Matters på technical@seatingmatters.com for yderligere rådgivning.
12. Brugeren hhv. borgeren må under ingen omstændigheder stå eller sidde på stolens fodplade.
13. Borgeren må ikke sidde i stolen, hvis stolen transporteres i et køretøj.
14. Terapistolen må under ingen omstændigheder løftes af andre end teknisk-uddannet personale.
15. Sørg for, at der er et 450 mm frirum rundt om stolen ved betjening af benstøtte og vinklings-funktioner. Dette for at hindre, at stoleryg- eller benstøtten støder ind i en væg eller en anden genstand.
16. På ældre modeller skal du sørge for, at din stol oplades dagligt.

Kontakt venligst Botved, hvis du har spørgsmål til ovenstående: tlf. 80 37 37 37 eller info@botved.dk.

VEDLIGEHOJDELSE OG SERVICE

Regelmæssig service af din Seating Matters stol vil forhindre unødvendige og ubejlelige nedbrud, reducere reparationsomkostninger og forlænge stolens levetid. Beskadigelse af stolen kan også forårsage for stor belastning for brugeren og borgeren.

VIGTIGT

Dele må kun udskiftes af teknisk personale uddannet i Seating Matters produkter og kun med brug af Seating Matters dele. Vi anbefaler, at der tegnes en serviceaftale med Botved angående reparationer og vedligeholdelse.

VEDLIGEHOJDELSE

Udfør følgende regelmæssige kontroller af stolens funktion og sikkerhed. Ved tvivl om stolens funktion, så kontakt umiddelbart Botved: tlf. 80 37 37 37 eller info@botved.dk.

DAGLIGT

1. Kontroller at hjulene ikke er beskadigede.
2. Kontroller at hjulene drejer frit.
3. Sørg for at styrehjulsgaflerne løber frit og ikke er bøjele.
4. Tjek beklædningen for skader eller tilsmudsning og udskift om nødvendigt.
5. Se afsnittet Rengøringsvejledning i manualen for rengøringsinstruktioner.
6. Kontroller at batterier og elektriske dele ikke er beskadiget og er korrekt forbundet.

UGENTLIGT

1. Tjek hjulbeslagene for hår og snavs og lign., som kan begrænse hjulet.
2. Fjern tilsmudsning med en pincet og eller tag spindlen ud, rengør den og sæt den derefter på plads igen.
3. Hvis hjulet, efter rengøring, ikke kører frit, så kontakt umiddelbart Botved for udskiftning: tlf. 80 37 37 37 eller info@botved.dk.

MÅNEDLIGT

Hjul

Sørg for, at toppen af hjulhuset er parallelt med gulvet. Enhver skævhed vil begrænse hjulets bevægelse. Hvis det er beskadiget, så kontakt Botved for udskiftning.

Mekanismer

Kontroller at alle vippefunktioner fungerer let og smidigt.

Kontroller at kablerne ikke er bøjele eller flossede. Kontroller at alle møtrikker og bolte er til stede og korrekt spændt.

Bemærk: Hvis der mangler bolte eller møtrikker, så undlad at anvende stolen til manglen er udbedret.

Benstøtte

Tjek at alle benstøtter nemt kan fjernes/ svinges væk. Sørg for at delene låser sikkert på plads. Hvis delene ikke låser som tiltænkt bør de evt. smøres illustration. Hvis problemet ikke løses herved, så kontakt Botved.

Ramme

Tjek de synlige dele af rammen for bristninger, brud, store buler eller andre skader. Hvis der findes fejl på rammen, må stolen ikke bruges. Kontakt umiddelbart Botved.

GENBRUGSPOLITIK

Såvel Botved som Seating Matters har forpligtet sig til at reducere spild og reducere miljøbelastningen. Derfor fremstilles Seating Matters stolene med genanvendelige materialer i størst muligt omfang. Vejledning om genbrug kan findes nedenfor.

WEEE-direktivet

WEEE-direktivet, 2012/19/EC, opfordrer producenter af elektronisk udstyr (EEE) til at give information om, hvordan disse produkter kan behandles, genbruges eller genanvendes.

For at overholde dette direktiv i EU er Seating Matters elektriske komponenter markeret med en overstreget skraldespand på hjul. Dette indikerer, at de elektriske komponenter skal behandles i overensstemmelse med WEEE-reglerne, når de tages ud af brug.

Råd om genbrug

1. Et Seating Matters-produkt kan indeholde batterier, som ikke må bortskaffes i husholdningsaffald.
2. Bortskaf aldrig batteriet i åben ild. Dette kan forårsage en eksplosion.
3. Produktet kan indeholde stoffer, der kan være skadelige for miljøet.
4. Elektriske komponenter skal transporteres til et autoriseret genbrugsanlæg.
5. Et Seating Matters-produkt indeholder komponenter, der kan genbruges.
6. Vi takker borger og bruger for at være miljøansvarlig og for at gøre en indsats for genbrug af et Seating Matters-produkt ved slutningen af dets levetid.
7. Kontakt den lokale, regionale eller statslige myndighed for regler for området.
8. Hvis du ønsker at få Seating Matters til at genbruge stolen på dine vegne, er du velkommen til at returnere produktet til vores virksomhed.



Plastkomponenter

Mange af vores plastikkomponenter er lavet af polypropylen og kan genbruges, så længe det sker sammen med andre polypropylen-resinmaterialer. Polypropylenplader kan genbruges med alle andre materialer, der har dette symbol.



Plastbakker

Vores plastbakkeborde er lavet af polyethylen terephthalate glycol (PETG), som er et robust, gennemsigtigt materiale, der er let at rengøre. Ligesom akryl er PETG 100 % genanvendeligt og kan genbruges på ubestemt tid. Idet PETG kan steriliseres, er det et fødevarsikkert materiale, som hjælper til at opnå en højere standard mod infektionsforebyggelse og -kontrol. Det er desuden ekstremt slagfast og genanvendeligt. PETGs skadesbestandighed er langt højere end akryl og har en slagfasthed, der er 30 gange større end glas. PETG kan genbruges med alle andre materialer, der har dette symbol.



Sikkerhed

Sorrento Bariatri™ er CE-mærket for at vise overensstemmelse med "EU-Direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF", og produktet er i overensstemmelse med BS/DS ISO 7176 for kørestole.

Regionale variationer

Enheden, der omtales som en " Sorrento Bariatri™", er en Seating Matters produktkategori, og oplysningerne i dette dokument afspejler fælles træk ved denne gruppe af produkter. I nogle regioner i verden leverer vi produktdesignsvarianter med tilsvarende funktioner og brugervenlighed, men med alternative specifikationer eller forstærkninger.

GARANTI

Følgende tabel viser de dele af stolens ramme, der er dækket af garantien:

| Stolemodel | Ramme garantiperiode | Dækkede rammedele |
|--|----------------------|---|
| Phoenix & Sorrento (voksen) Phoenix & Sorrento (børn) Sorrento Bariatri Atlanta Monaco | 7 år | (a) metalbundramme; (b) metalsæderamme; (c) metalryglænsramme; (d) armlænsbeslag; (e) brud eller bristninger i metaldele; (f) benstøtte-montagedele og samlinger (g) alle monteringspunkter til gasfjedre og el-aktuatorer; |
| Milano Sydney | 3 år | (h) alle metalbeslag og hængsler |
| Denver | 1 år | (i) alle svejsninger på stolens stel. |

Følgende tabel viser de dele af stolens komponenter, der er dækket af garantien:

| Stolemodel | Komponent garantiperiode | Komponenter, der er omfattet |
|--|--------------------------|---|
| Phoenix & Sorrento (voksen) Phoenix & Sorrento (børn) Sorrento Bariatri Atlanta Monaco Milano Sydney Denver | 1 år | (a) Aktuatorer inklusive kontrolboks, håndsæt og oplader/opladerkabel. (b) Gasfjedre inklusive udløserkabler og tilhørende komponenter. (c) Polstring, forudsat åbenlys fabriktionsfejl (mindre variationer påvirker ikke materialets holdbarhed eller stolens funktion). (d) Hjul (e) Vingeskrue og justeringshåndtag. (f) Bolte og fastgørelsesbeslag. |

For komplette vilkår og betingelser besøg Seating Matters hjemmeside eller scan QR-koden her:



INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Seating Matters er på forkant med forskning og design inden for plejestole og tager derfor beskyttelsen af deres intellektuelle ejendom meget alvorligt. Deres design, patenter og varemærker er beskyttet i mange lande over hele verden.

Seating Matters Trademark er registreret i hele EU og i en række lande globalt.

Patent Pending No. GB1915470.7

US Design Patent No. 6013605

No. D611718

No. 600932

No. D6027045

**Australian Design
Registration**

No. 325536

No. 324011

No. 325537

No. 324012

**Community Design
Registration**

No. 001016364-002

No. 000942180-0004

No. 002428813-0001

No. 001016364-001

No. 012673018

**Canadian Design
Registration**

No. 130224

No. 128763

No. 130217

No. 128764

Vi er her for at hjælpe

For eventuelle spørgsmål eller forespørgsler vedr. din Seating Matters stol kontakt venligst: contact@seatingmatters.com



Australia

9/256 New Line Road
Dural
NSW 2158
Australia
T: +61 1300 001 050
australia@seatingmatters.com

USA

300 International Dr
Suite 100, Buffalo
New York, USA
NY 14221
T: +1 (905) 507 9007
usa@seatingmatters.com

UK & Europe

131 Carnamuff Road
Limavady
Northern Ireland
BT49 9JG
T: +44 (0) 28 777 666 24
contact@seatingmatters.com



A/S A.P Botved

Nørrelundvej 5
2730 Herlev
Danmark
T: +45 80 37 37 37
info@botved.dk